



Fibo Hygiene und Technik GmbH  
Jägerstr. 12  
73650 Winterbach  
Tel. 07181 / 75098  
Fax. 07181 / 44231



[www.fibohygiene.de](http://www.fibohygiene.de)

**Gebrauchsanweisung**

**Gelenkverletzungen**



Wasserfest !

Den Verband aus der Plastikverpackung entnehmen und ein Wundkissen je nach Größe und Blutung der Wunde falten.



Fettfest !

Das Wundkissen auf die Wunde legen und den Verband mit mittelmäßigem Zug auf beiden Seiten des Wundkissens herumwickeln.



Elastisch !

Den Verband zum Wundkissen zurückführen. Einfach abreißen und das Ende fest anheften. Einfach schnell und sicher!



**Kuppenverletzungen**



Den Verband ohne Komresse hinter dem ersten Gelenk einmal herumwickeln und in Richtung der Kuppe nach oben wickeln.



Je nach Größe der Verletzung ein Wundkissen durch mehrmaliges herumwickeln formen und in Richtung der Verletzung umknicken. Nun zurückwickeln und abreißen.



BF-SCHU-PLAST® hinterlässt keine Ränder und Klebrückstände! Der Verband klebt nicht auf der Haut, Haaren und Wunde. Dadurch lässt er sich problemlos und schmerzfrei wieder entfernen. Auch bei Pflasterallergien zu verwenden! Durch das schmerzlose Entfernen auch bei Kindern sehr beliebt.

FIBO bringt  
Hygiene rein!

**1 Kt. = 10 RI.  
32,50 € + MwSt.**



FIBO bringt  
Hygiene rein!